

AQUA-Xを清拭する際の薬品について

AQUA-X シリーズ



エプロンタイプ



コートタイプ



ネックガード



寝台用X線防護カーテン

ERCP用X線TV装置
散乱線防護クロス

汗や薬品など汚れが酷い場合は、
水で丸洗いできるのは嬉しい！

日常的に清拭をする時にアルコールを使っている
けど大丈夫かな？



Answer

はい大丈夫です！**水洗い**はもちろん、**アルコール等の薬品**を
使用しても**問題ございません。**

下記は弊社独自で表面材の**耐薬品試験**を行い、**使用して問題ない薬品の一例**となります。

アルコール類	濃度(%)	アルコール類	濃度(%)
シクロヘキサノール	100%	2-エチルヘキサノール	100%
ブチルアルコール	100%	メチルアルコール	100%
エチルアルコール	100%	エチレングリコール	100%
グレセリン	100%	エチレングリコール	50%
無機塩素類	濃度(%)	グレソール	100%
アンモニア水	100%		

※試験方法：上記薬品に30日浸漬